

现象	可能原因	处理方法
手机无水	手机喷水孔堵住。	疏通手机喷水孔。
	脚开关上水开关未打开。	将脚开关上水开关拨向右边。
	手机水调节阀未打开。	打开手机水调节阀，调至出水合适。
手机无力或不转	手机工作气压过低。	调整手机工作气压。
	手机轴承损坏。	更换手机轴承。
	车针磨损或未夹紧。	更换新车针并夹紧。
	手机管道有堵塞物。	疏通手机管道。
	手机内气管漏气。	更换手机外壳
三用枪按钮处漏水	O 型圈磨损老化。	更换 O 型圈，并加硅脂油润滑。
三用枪喷雾差	三用枪水、气接反。	对换三用枪水、气管。
	三用枪水压过大或气压过小。	调整三用枪水、气压力大小。
漱口、冲盂水小或无水	水压太低。	安装增压水泵。
	水过滤器堵塞。	清洗水过滤器滤芯。
	箱体电磁阀损坏。	更换箱体电磁阀。
	连接线、接插件接触不良。	查找连接线接触不良处，重新连接。
	电器控制板故障。	更换电器控制板。
	控制按键接触不良。	更换控制键盘板。
吸唾器、强力吸引器吸力小或无吸力	供气压力过低。	调整供气压力应为 0.5MPa。
	负压发生器堵塞。	拆洗负压发生器，清除堵塞物。
	管道、接头漏气。	检查管道、接头。

现象	可能原因	处理方法
治疗机无任何反应	电源插头未插好或接触不良。	更换电源插头或电源插座。
	电源保险丝熔断。	先查清熔断原因再更换电源保险丝。
	地箱变压器损坏。	更换地箱变压器。
	电源开关损坏。	更换电源开关。
口腔灯不亮	口腔灯泡损坏。	更换新灯泡。
	连接线接触不良。	查找连接不良处。
	口腔灯开关接触不良。	更换口腔灯开关。
	地箱变压器引出线接触不良。	重新连接地箱变压器引出线或更换地箱变压器。
椅位无动作且声音提示正常，其余按键工作正常	继电器触点接触不良或线圈损坏。	清洁继电器触点或更换新继电器。
	电机损坏或连接线断路。	查找断路处重新连接或更换电机。
观片灯不亮	灯管损坏。	更换灯管。
	连线接触不良。	修复连线接触不良。
器械盘下垂	器械盘放置物 > 2Kg。	减少放置物重量。
	平衡弹簧疲劳损坏。	更换平衡弹簧。
	平衡阻尼磨损。	更换平衡阻尼。